
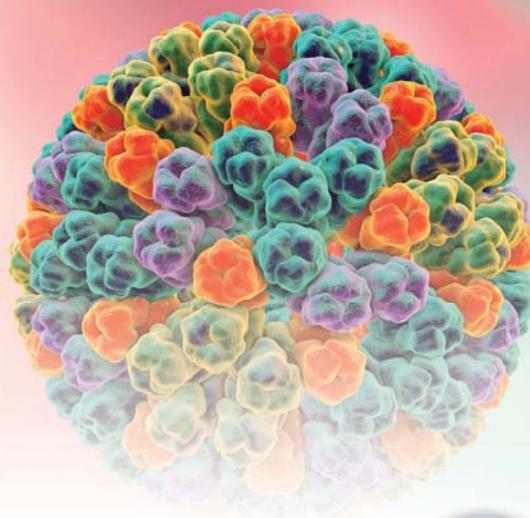


Rotavirus + Adenovirus detection kit

CerTest
BIOTEC

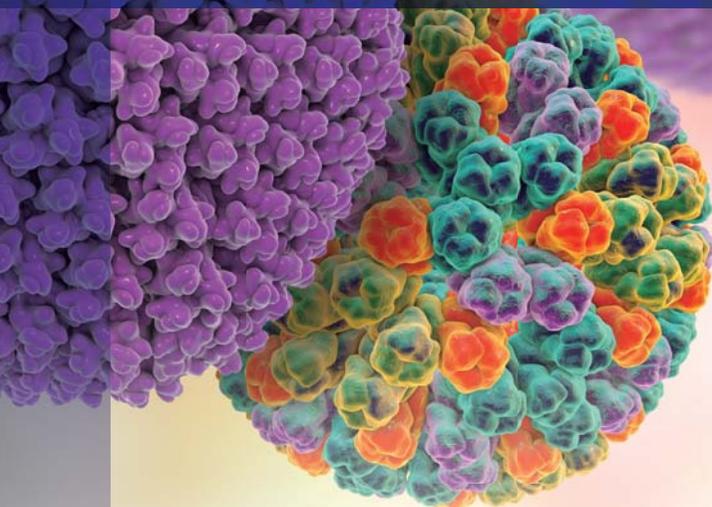

Patología y descripción del test

Rotavirus y *Adenovirus* son los agentes más frecuentes causantes de gastroenteritis en niños y jóvenes, también detectados en adultos. Estos virus se transmiten por contacto fecal-oral. Los principales síntomas de gastroenteritis vírica son diarrea acuosa y vómitos.

También puede presentarse dolor de cabeza, fiebre y dolor de estómago. Por lo general, los síntomas


comienzan 1 ó 2 días después de infectarse y pueden durar de 1 a 10 días, dependiendo del virus causante de la enfermedad (3 días para *Rotavirus*, 5-8 días para *Adenovirus*).

CerTest *Rotavirus+ Adenovirus* one step combo card test ofrece un ensayo de cribado sencillo y de alta sensibilidad para realizar un diagnóstico presuntivo de infección por *Rotavirus* y/o *Adenovirus*.



Rotavirus + Adenovirus detection kit

Procedimiento del test

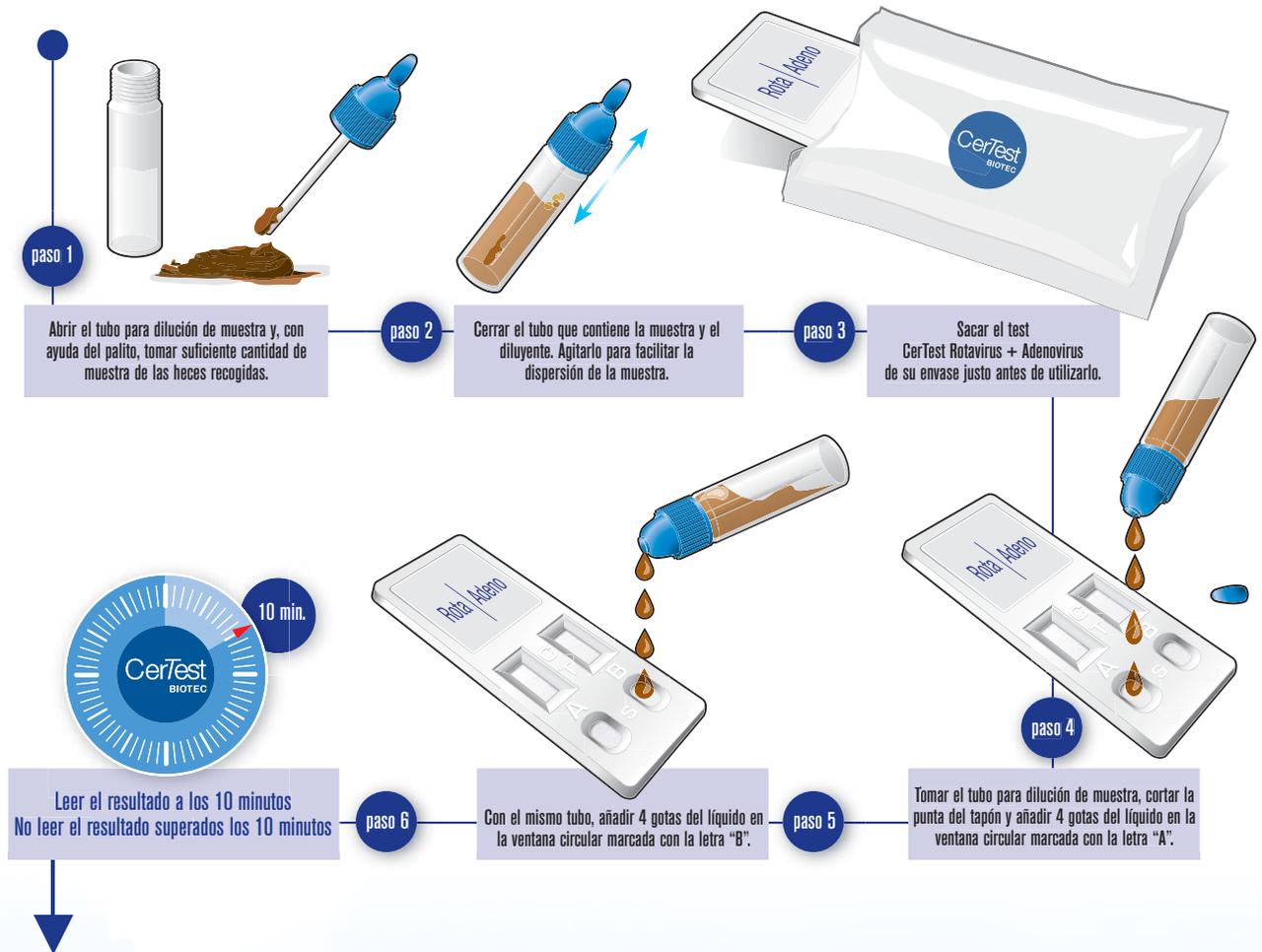

Interpretación de los resultados



CUALQUIER OTRO RESULTADO: INVÁLIDO

Tabla de Sensibilidad y Especificidad

	Sensibilidad	Especificidad	VPP	VPN
CerTest Rotavirus+Adenovirus (Rotavirus) vs. Ridascreen® Rotavirus Elisa Test	>99%	>98%	>94%	>99%

	Sensibilidad	Especificidad	VPP	VPN
CerTest Rotavirus+Adenovirus (Adenovirus) vs. PCR	>99%	>99%	>99%	>99%



CERTEST BIOTEC, S.L.
 Pol. Industrial Río Gállego II, Calle J, Nº 1,
 50840, San Mateo de Gállego, Zaragoza (España)
 www.certest.es

